



# Cargue un cartucho

## en la bomba de insulina t:slim X2

Las instrucciones que se encuentran a continuación se proporcionan como una herramienta de referencia para los cuidadores que ya están familiarizados con el uso de una bomba de insulina y con la terapia con insulina en general. No se muestran todas las pantallas. Consulte la Guía del usuario para obtener más información detallada sobre la operación de la bomba de insulina Tandem t:slim X2™.

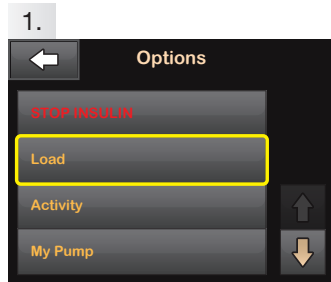


1. En el menú Opciones, presione Load (Cargar).

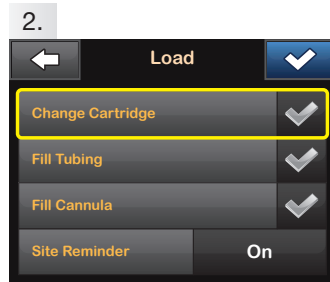


2. Presione Change Cartridge (Cambiar cartucho). Aparecerá una pantalla para confirmar que todos los suministros de insulina se detendrán.

Presione  para continuar.

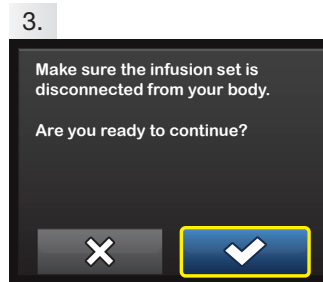


3. Desconecte el equipo de infusión del cuerpo del usuario y presione  para continuar.

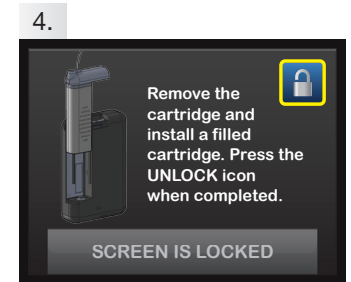


4. Retire el cartucho usado. Instale un cartucho lleno. Cuando haya terminado, presione el ícono de desbloqueo.

Presione  para continuar.

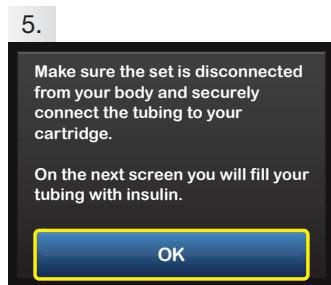


5. Verifique que el equipo de infusión esté desconectado del cuerpo del usuario. Conecte el tubo del equipo de infusión al conector del tubo en el cartucho. Presione .

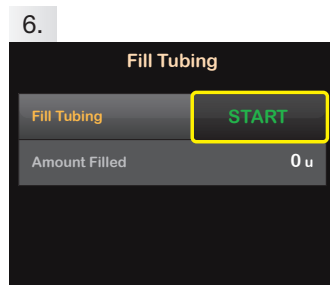


6. Sostenga la bomba en posición vertical para asegurarse de que el aire del cartucho se disipe primero.

Presione START (COMENZAR). La bomba emitirá un pitido o vibración con regularidad mientras se llena el tubo.

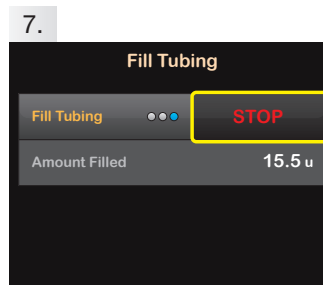


7. Presione STOP (DETENER) cuando se vean tres gotas de insulina al final del tubo del equipo de insulina.

Verifique que se vean las gotas y presione DONE (LISTO).

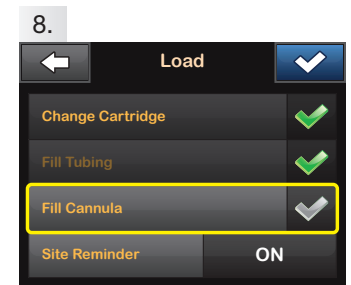


8. En la pantalla de Carga, presione Fill Cannula (Llenar cánula). Inserte un nuevo equipo de infusión y conecte el tubo lleno en el sitio; luego presione .

**NOTA:** Cuando se usa un equipo de infusión con una aguja de acero, no hay cánula. Vaya al paso 10.

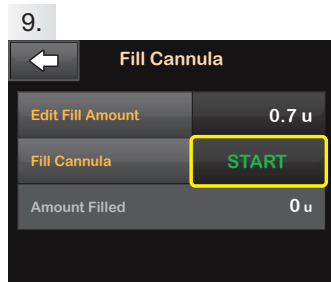


9. Presione Edit Fill Amount (Editar cantidad de llenado).

Seleccione la cantidad necesaria para llenar la cánula. Consulte las Instrucciones de uso del equipo de infusión a fin de conocer la cantidad adecuada que se debe usar para llenar la cánula. Presione START (COMENZAR).

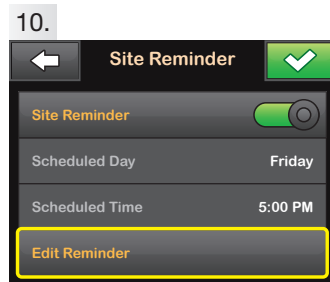

10. Luego de que la cánula esté llena por completo, el usuario puede configurar un Recordatorio de cambio de sitio.


Presione  si esto es correcto. Presione Tap Edit (Editar recordatorio) si se debe cambiar la configuración.

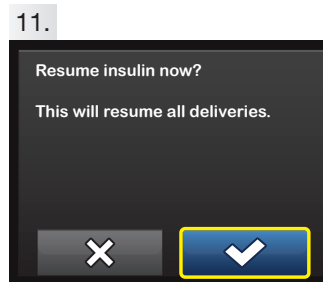

11. Se mostrará la pantalla de carga.

Presione . Se mostrará un recordatorio para controlar la glucemia en 1 o 2 horas.

Presione .




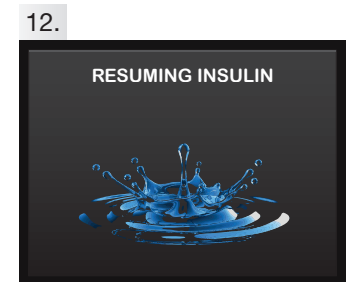


12. Aparecerá la pantalla RESUMING INSULIN.

# Instrucciones para pasar la insulina del frasco a la jeringa

Utilice la técnica aséptica adecuada mientras realiza lo siguiente:

1. Inspeccione la aguja y la jeringa para detectar cualquier signo de daño. Deseche cualquier producto dañado.
2. Lávese bien las manos.
3. Limpie el tapón de goma del frasco de insulina con un hisopo con alcohol.
4. Saque la aguja y la jeringa de su envoltorio. Gire firmemente la aguja en la jeringa. Retire con seguridad la tapa protectora de la aguja tirando hacia afuera.
5. Introduzca aire en la jeringa hasta la cantidad deseada (*ver imagen A*).
6. Con el frasco de insulina en posición vertical, inserte la aguja en el frasco. Inyecte aire de la jeringa en el frasco. Mantenga la presión en el émbolo de la jeringa (*ver imagen B*).
7. Aún con la aguja dentro del frasco, voltee el frasco y la jeringa boca abajo. Suelte el émbolo de la jeringa. La insulina comenzará a fluir del frasco a la jeringa.
8. Tire lentamente del émbolo hasta la cantidad deseada de insulina (*ver imagen C*).
9. Mientras la aguja de llenado aún está en el frasco y boca abajo, golpee la jeringa para que las burbujas de aire suban a la parte superior (*ver imagen D*). Luego empuje lentamente el émbolo hacia arriba para forzar a que las burbujas de aire vuelvan a entrar en el frasco.
10. Compruebe que no haya burbujas de aire en la jeringa y realice una de las siguientes acciones:
  - » Si hay burbujas de aire, repita el paso 9.
  - » Si no hay burbujas de aire, retire la aguja de llenado del frasco.

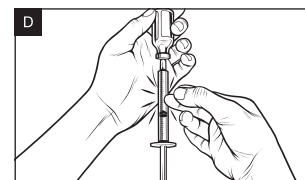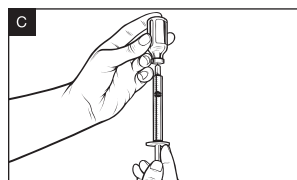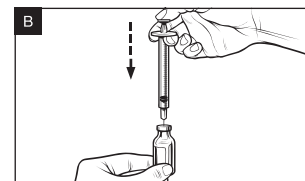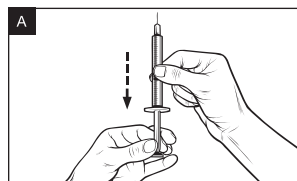

# Instrucciones para llenar el cartucho

Dependiendo del modelo de bomba, un mensaje en pantalla le indicará al usuario cargar un cartucho vacío o un cartucho lleno en la bomba.



Si se indica llenar un **cartucho sin usar (vacío)**, realice lo siguiente **luego de cargar el cartucho en la bomba**.

O



Si se indica cargar un **cartucho lleno**, realice lo siguiente **antes de cargar el cartucho en la bomba**.

Consulte la *Guía del usuario* que viene con el sistema para obtener instrucciones de instalación detalladas.

1. Inspeccione el paquete del cartucho para detectar cualquier signo de daño. Deseche cualquier producto dañado.
2. Abra el paquete y retire el cartucho.
3. Sostenga el cartucho en posición vertical e inserte suavemente la aguja en el puerto de llenado de insulina blanco del cartucho (*ver imagen E*). La aguja no está diseñada para insertarse por completo, así que no la fuerce.
4. Manteniendo la jeringa alineada verticalmente con el cartucho y la aguja dentro del puerto de llenado, tire del émbolo hasta que esté completamente retraído (*ver imagen F*). Esta acción eliminará el aire residual del cartucho. Las burbujas subirán hacia el émbolo.
5. Asegúrese de que la aguja todavía esté en el puerto de llenado y suelte el émbolo. La presión empujará el émbolo a su posición neutral, pero NO empujará el aire hacia el interior del cartucho (*ver imagen G*).
6. Retire la aguja del puerto de llenado.
7. Gire la jeringa hacia arriba y tire del émbolo hacia abajo (*ver imagen H*). Sacuda el cilindro para asegurarse de que las burbujas de aire suban a la parte superior.
8. Presione suavemente el émbolo para eliminar las burbujas de aire hasta que la insulina llene el conector de la aguja y vea una gota de insulina en la punta de la aguja (*ver imagen I*).
9. Vuelva a insertar la aguja en el puerto de llenado y llene lentamente el cartucho con insulina (*ver imagen J*). Es normal sentir cierta contrapresión cuando se presiona el émbolo.
10. Mantenga la presión en el émbolo mientras se retira la aguja del cartucho. Verifique que el cartucho no tenga derrames. Si se detectan derrames de insulina, deseche el cartucho y repita todo el proceso con un cartucho nuevo.
11. Siempre siga las regulaciones de la comunidad para desechar las agujas, las jeringas, los cartuchos y los equipos de infusión usados.

